

*Det bekväma och praktiska säkerhetsbältet.*



Fallolyckor är tyvärr mycket vanligt bland äldre människor på sjukhus, sjukhem och även i hemmen och orsakar ofta frakturer och andra skador. Förebyggande åtgärder behövs. Ett säkerhetsbälte kan förhindra många fallolyckor. Det är lika naturligt att använda ett säkerhetsbälte på en rullstol som i en bil.

Sinanco Sittstöd kan användas på de flesta stolar, t.ex. rullstolar, karmstolar, matbordsstolar etc. Det fästes enkelt runt stolsryggen med kardborreband utan verktyg och är lätt att flytta mellan olika stolar. Vid normal användning kan patienten lätt lösgöra sig själv och det handlar alltså inte om fastspänning.



*Gör så här:*



**1** *Lägg bältet runt t.ex. en stol och lås fast det med det ljusblå kardborrebandet.*



**2** *Knäpp fast bältet runt vårdtagaren. Önskas en låsning av midjebandet ska det smalare bandet användas.*



**3** *Det smalare bandet dras runt och fästes på baksidan. För att göra det lite enklare är kardborrebanden i olika färgnyans. Den ljusblå ska knäppas runt stolen och den mörkblå delen runt vårdtagaren.*



*Tvättas i 60 grader. Finns i tre storlekar TR-1505 = Small TR-1500 = Medium TR-1510 = Large*